


DESCO WIPES

Dezenfektan ve Temizleyici Emdirilebilen Özel Dokulu Silme Mendili

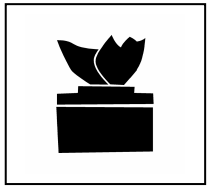

Kuru Mendiller



Ürün Özellikleri

Yüzeylerde ve tıbbi cihazlarda hızlı ve kolay temizlik ve dezenfeksiyon için yüzey dezenfektanı ve temizleyici emdirilebilen kuru temizleme mendilidir. **Desco Wipes** yüksek kaliteli, özel dokulu malzemeden üretilmiştir.

Desco Wipes özellikle yüzey dezenfeksiyonu için geliştirilmiştir. Mendiller dezenfeksiyon solüsyonunun etkili bir şekilde yüzeye yayılmasını ve yüzeyin tamamen ıslanmasını garanti eder.

Desco Wipes özel olarak dizayn edilmiş dispenser kova sisteminden kolayca çekilerek kullanılır. Kova kolayca yeniden kapatılabilen kapak sistemine sahiptir.

Kullanım Alanları

Yüzeylerin ve tıbbi cihazların hızlı, etkili ve ekonomik dezenfeksiyon ve temizliğinde.

Kullanım Şekli

Gerekli olan dezenfektan ya da temizleyicinin 2-2,5 L kullanıma hazır çözeltisi hazırlanır. (konsantrasyon ve etki süresi için üreticinin talimatlarına bakınız)

Dispenser sistemine sahip kovadaki mendillere 2-2,5 L kullanıma hazır alkolü dezenfektan ya da dezenfektan veya temizleyici solüsyonu emdiriniz. Mendillerin ıslanması yaklaşık 30 dakika sürer.

Lütfen yüzeyler ve cihazları mendille dikkatlice siliniz ve dezenfektan ya da temizleyicinin etki etme süresince bekleyiniz.

Tüm yüzey dezenfektanlarımızın seyreltilmiş çözeltilerinin kullanım süresi DGHM tarafından test edilmiştir. Kullanıma hazır alkol bazlı sprey dezenfektanlarımızın kullanım süresi de aynı şekilde test edilmiştir. Her bir dezenfektanın kullanıma hazırlanmış çözeltisinin kullanım süresi en az 30 gündür.

Desco Wipes kovadan teker teker çekilerek alınır. Ambalajı açıldıktan sonra diğer mendiller kovanın özel kapak sisteminden dolayı çok iyi korunur. Eğer gerekli ise kova temizlenebilir. Daha sonra kapak kovadan ayrılır, yeni mendil rulosu konur ve ilk mendil kapaktan çekilir.

Lot bilgisinin, üretim ve son kullanma tarihinin dökümante edilmesine yarayan özel etiketler yardımcı malzeme olarak mevcuttur.

Bileşimi

1 rulo 90 adet kuru mendilden (her biri 32cmx30cm) meydana gelmektedir. Mendiller yüksek kaliteli tüsüz ve içe doğru döndürülmüş özel dokulu malzemeden yapılmıştır

1 adet mendil ile yaklaşık 5,5 m² alan temizlenebilir.

Ambalaj Şekilleri

| Açıklama | Ambalaj | Art.-No |
|---|----------|------------|
| 1 rulo Desco Wipes içeren dispensing sistemli kova | 1x1 kova | 00-915-010 |
| 6 rulo'luk Desco Wipes refill mendil | 6x1 rulo | 00-915-006 |

*Her bir rulo 90 mendildir.

Yardımcı Malzemeler

*Lot numarası, üretim ve son kullanma tarihlerinin yazıldığı özel etiketler yardımcı malzeme olarak mevcuttur

DESCO WIPES

Dezenfektan ve Temizleyici Emdirilebilen Özel Dokulu Silme Mendili



Kuru Mendiller

DR.SCHUMACHER GMBH Yüzey Dezenfektanlarının DESCO WIPES'lar ile Birlikte Kullanımında Yüzey Dezenfektanlarının Kullanım sürelerine Dair Açıklama

Burada DESCO WIPES'ların normal depolama koşullarında ve kendi dispenser kovanında kapalı şekilde depolandığında,aşağıdaki yüzey dezenfektanları ile ıslatıldıktan sonra kullanım ömrünün 4 hafta olduğunu beyan ederiz.

BIGUANID FLACHE
CLEANISEPT
DESCOSEPT AF
DESCOSEPT
DESCOSAL
DESCOFIX PLUS

Oda sıcaklığında kapalı şekilde depolanan DESCO WIPES dispenser kovasındaki seyreltilmiş çözeltilerden numune alınarak aktif madde tayin testleri uygulanmıştır.Testlerin grafiksel gösterimleri istek üzerine sağlanabilir.

Malzeme özelliği ve yüzey yapısından dolayı DESCO WIPES özellikle yüzey dezenfeksiyonu için uygundur. Belirtilen mendil özelliği aktif maddelerin salınımını ve bu esnada herhangi bir etkinlik kaybı olmayacağını garanti eder.

ÜRÜN DEĞİŞİKLİĞİNDE UYGULAMA TAVSİYELERİ

Aldehitsiz ve aldehit içeren dezenfektanlar birbirleriyle uyumlu değildir.Önlem olarak dispenser kova yeniden doldurulmadan önce temizlenmelidir ve sadece daha önce kullanılan aynı tip ürün ile kullanılmalıdır. Uyumsuz aktif maddeli ürünlerin karışması durumunda dezenfekte edilen yüzeylerde renklenmeler meydana gelebilir.