

DESCOCEPT AF TÜCHER

Yüzeyler İçin Dezenfeksiyon Mendili

Tıbbi Cihaz Kanununa Göre Tıbbi Cihazların ve Biosit Kanununa Göre Yüzeylerin Hızlı Dezenfeksiyonu

Preparat Tipi

Kullanıma hazır mendiller Tıbbi Cihaz Kanununa göre küçük yüzeylerin ve medikal cihazların hızlı ve etkili dezenfeksiyonunda kullanılır. Dezenfektan solüsyonunun bileşimi etanol ve kuaterner amonyum bileşiklerine dayanır. **Descosept AF Tücher** hoş bir kokuya sahiptir ve cilt tarafından iyi tolere edilir. **Descosept AF Tücher** aldehitsiz olmasından dolayı kullanımından sonra renk değişimi yapmaz. Hızlı dezenfeksiyon gerektiren tüm alanlarda:

- Hızlı dezenfeksiyona ihtiyaç duyulan dental ve medikal uygulamalarda (muayene masaları, açılı parçalar).
- Gözlerin virüs infeksiyonunu önlemek için göz doktoru muayenelerinde ve gözlükçülerde.
- Ameliyathanelerde teçhizatın hızlı dezenfeksiyonu için (operasyonlar arasında ameliyat masalarının dezenfeksiyonu dahil).
- Yatak iskeleti
- Ambulanslarda ve çöp kutularında
- Sedyeler, bandaj malzemelerinin taşındığı taşıma arabalarında, tepsilerde, banyo kabinleri, muayene masaları, tuvalet oturakları, klozetler gibi genel envanterde.
- Ameliyathanede kullanılan ayakkabılarda, kaucuk önlüklerde.

Descosept AF Tücher alkole duyarlı yüzeyler (akrilik camlar) hariç tüm yüzeylerde kullanılabilir.

Descosept AF Tücher medikal faaliyetlerde hassasiyet yaratıcı maddelerin kullanılmaması ile ilgili Alman yönetmeliğinin gerekliliklerini yerine getirir (**TRGS 525/540**).

Kullanım Alanları

Tıbbi Cihaz Yönetmeliğine göre: Alkole dayanıklı medikal envanter ve cihazların hızlı dezenfeksiyonunda.

Biosit Kanununa göre: Alkole dayanıklı yüzeylerin hızlı dezenfeksiyonu ve temizliğinde.

Kullanım Şekli

Kutunun içindeki mendil poşetini açın. Bir tane mendil rulodan çekin, kutunun kapağının ortasından geçirip dışarı çekin ve kapağı kutunun üzerine yerleştirin. **Descosept AF Mendil** ile yüzey ve objeler tamamen ıslanmaya kadar silin. Etki süresi geçtikten sonra gerekli ise yüzeyde kalan dezenfektanı silin. **Descosept AF Tücher** uygulandığı yüzeyde kalıntı bırakmaz.

Antimikrobiyal Özellikleri

- Bakterisid (Tbc, MRSA dahil)
- Fungusid
- Virüs inaktive edici (HBV/HIV, HCV, BVDV, Adeno, Rota, Vakzinia, Noro/Norwalk Like Virüs)



**Aldehitsiz
Fenolsüz
Dezenfeksiyon solüsyonu
DGHM/VAH listesinde.
Dermatolojik olarak test
edilmiştir.**

Descosept AF çözeltisi yeni DGHM/VAH rehberi 09/2001'e göre etki etme süresi :1dakika*
(*DGHM/VAH listesinde 5dk. da kayıtlıdır.)

Vakzinia, BVDV, HBV, HIV, HCV gibi zarflı virüslerin inaktivasyonunda (begrenzt virüsid) : 30 saniye
Tbc: : 1 dakika
Rota/Adeno virüsleri : 1 dakika
Noro-/Norwalk like virus (FCV) : 15 dakika

Bileşimi

Descosept AF çözeltisi, etanol, didesyl dimethylammoniumchlorid aktif maddelerini içerir. Sıvının içeriği: Refill poşet ve kutu başına 210 g Descosept AF içerir.

Kimyasal ve Fiziksel Özellikleri

Bilgiler **Descosept AF** çözeltisine aittir:
Konsantrinin görünümü : berrak, renksiz çözelti
pH değeri : 7 +/- 1,0
Yoğunluk (20°C) : 0,930 +/- 0,002g/ml
Parlama noktası : 25 °C

Önemli Uyarılar

Kolay alevlenebilir. Parlama noktası DIN 15755'e göre > 27°C. Elektrik parçalarına veya açık alevle temas ettirmeyiniz. Gözle teması halinde bol su ile yıkayınız ve gerekli ise doktora başvurunuz. Ambalajı sıkıca kapalı tutunuz. Yanıcı kaynaklardan uzak tutunuz-sigara içmeyiniz. Çocuklardan uzak tutunuz. Zehirlenme durumlarında gerektiğinde Ulusal Zehir Merkezinin (UZEM) ücretsiz 114 no'lu telefonunu arayınız.

Ambalaj Şekilleri

Açıklama	Ambalaj
PE-120'lik kutu	12x1kutu
120'lik dolun paketi (refill)	12x1 paket

Bilirkişi Raporları

Bilirkişi raporları Descosept AF çözeltisine aittir.

Prof. Dr. Schubert, Hijyenist, Frankfurt:
DGHM/VAH rehberine göre yüzey dezenfeksiyonuna ilişkin bilirkişi raporu, 27.11.2000.
Prof. Dr. Wille/ Dr. Färber, Hijyenist, Gießen :
-DGHM/VAH rehberine göre yüzey dezenfeksiyonuna ilişkin bilirkişi raporu, 16.06.1998.
-Yeni DGHM/VAH rehberi 9/2001'e göre yüzey dezenfeksiyonuna ilişkin ilave bilirkişi raporu, 08.12.2003.
O. Univ.-Prof. Dr. Rotter, Dip. Bact. (London), Wien:
DGHM/VAH rehberine göre yüzey dezenfeksiyonuna ilişkin bilirkişi raporu, 28.02.2006.
Dr. Steinmann, Virolog, Bremen :
Etkinlik raporları: Adeno virüs, 03.05.2001; FCV (Noro-/Norwalk-like-Virus), 04.04.2005;
Vakzinia, 12.12.2005; BVDV, 12.12.2005.
Dr. Werner, Hijyenist, Schwerin:
Tuberkuloidal etkinliğine dair bilirkişi raporu, 12.04.1999

DESCOCEPT AF TÜCHER

Yüzeyler İçin Dezenfeksiyon Mendili

**Tıbbi Cihaz Kanununa Göre Tıbbi Cihazların
ve Biosit Kanununa Göre Yüzeylerin Hızlı
Dezenfeksiyonu**

Dermatest , Münster:


Cilt irritasyon özelliklerine ait bilirkişi raporu (epidermal test),26.05.2000.

Konrad Hornschuch,AG

Skai-padding malzemelerin Descosept AF ile
dezenfeksiyonu üzerine tavsiyeler,09.08.2005.

Listeleme

Dezenfektan çözelti Descosept AF DGHM/VAH'ın güncel dezenfektan listesinde ruhsatlandırılmış ve kaydedilmiştir ve Biosit kanununa göre Koruyucu ve Mesleki Hekimlik üzerine Alman Enstitüsü'nde (Baua) biosit ürün olarak kaydedilmiştir. Baua kayıt no: N 20338
T.C. Sağlık Bakanlığı ithalat iznine sahiptir.

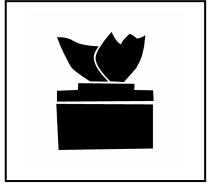

**Aldehitsiz
Fenolsüz
Dezenfeksiyon solüsyonu
DGHM/VAH listesinde dir.
Dermatolojik olarak test
edilmistir.**