


limon parfümlüsüde mevcut-

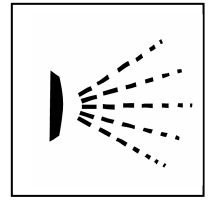

DESCOCEPT AF

Alkol İçerikli Sprey Dezenfektan

Aldehitsiz
Fenolsüz
DGHM/VAH listesindedir.
ÖGHMP listesindedir.
Dermatolojik olarak test edilmiş.

CE 0482

Tıbbi Cihaz Kanununa Göre Tıbbi Cihazların ve Biosit Kanununa Göre Yüzeylerin Hızlı Dezenfeksiyonu

Preparat Tipi

Etanol ve kuarterner amonyum bileşikler temelinde dayanan,aldehit içermeyen ,kullanıma hazır,hızlı püskürtme-silme dezenfektanı. **Descosept AF** özellikle ulaşılması güç yüzeyler için uygundur. **Descosept AF** ferah bir kokuya sahiptir ve cilt tarafından iyi tolere edilir. Aldehit içermediği için uygulama sonrası yüzeylerde renk değişimi yapmaz. Norwalk-like virüs dahil virüslere karşı geniş etkinlik.

Uygulandığı yerler :

- Hızlı dezenfeksiyona ihtiyaç duyulan dental ve medikal uygulamalarda (muayene masaları,açılı parçalar).
- Gözlerin virüs infeksiyonunu önlemek için göz doktoru muayenelerinde ve gözlükçülerde.
- Ameliyathanelerde teçhizatın hızlı dezenfeksiyonu için (operasyonlar arasında ameliyat masalarının dezenfeksiyonu dahil).
- Yatak kılıfları,çarşafı, battaniyeler ve yastıklarda.
- Ambulanslarda ve çöp kutularında
- Sedyeler, bandaj malzemelerinin taşındığı taşıma arabalarında,tepsilerde,banyo kabinleri,muayene masaları,tuvalet oturları,klozetler gibi genel envanterde.
- Tulum gibi kıyafetlerde,ameliyathanede kullanılan ayakkabılarda,kauçuk önlüklerde ve genel çamaşırlarda.

Alkole hassas yüzeylerde (akrilik camlarda) kullanmayınız.

Descosept AF,medikal uygulamalarda hassasiyet yaratıcı maddelerin kullanılmaması ile ilgili Alman yönetmeliğinin gerekliliklerini yerine getirir (TRGS 525/540).

Kullanım Alanları

Tıbbi Cihaz Yönetmeliğine göre: Alkole dayanıklı medikal envanter ve medikal cihazların hızlı dezenfeksiyonunda.

Biosit Kanununa göre: Alkole dayanıklı yüzeylerin hızlı dezenfeksiyonu ve temizliğinde. Özellikle ulaşılması güç yüzeyler için.

Kullanım Şekli

Yüzey ve köşelere en az 30 cm uzaklıktan tamamen ıslanincaya kadar **Descosept AF**'yi püskürtün, etki süresinin geçmesinden sonra yüzeyde kalan dezenfektanı temiz bir bez ile siliniz.

Havanın alkol ile yüklenmesini önlemek (ex protection) için **Descosept AF**'yi tek kullanımlık mendile püskürtün ve yüzeyleri ıslanmasını sağlayarak silin.

Descosept AF pratikte yüzeylerde herhangi bir film tabakası bırakmaz.

Antimikrobiyal Özellikleri

- Bakterisid (Tbc,MRSA dahil)
- Fungusid
- Virüs inaktive edici (HBV/HIV,HCV,BVDV,Adeno, Rota, Vakzinia,Noro/Norwalk Like Virus)

Yeni DGHM/VAH rehberine 09/2001'e göre etki etme süresi :1dakika* (*DGHM/VAH listesinde 5dk. da kayıtlıdır.)

Vakzinia,BVDV,HBV,HIV,HCV gibi zarflı virüslerin inaktivasyonunda (begrenzt virüsid) : 30 saniye
Tbc: : 1 dakika
Rota/Adeno virüsleri : 1 dakika
Noro-/Norwalk like virus (FCV) : 15 dakika

Bileşimi

100 g çözelti: 42 g Etanol,
0,05 g Didecyldimethylammoniumchlorid içerir.

Kimyasal ve Fiziksel Özellikleri

Konsantrinin görünümü : berrak,renksiz çözelti
pH değeri : 7 ± 1
Yoğunluk (20°C) : 0,930 ± 0,002g/ml
Alev alma noktası DIN 51755 : 25 °C

Önemli Uyarılar

Alev alabilir. DIN 15755'e göre alev alma noktası 25°C. Elektrik parçalarına veya açık aleve temas ettirmeyiniz. Gözle temas halinde derhal bol su ile yıkayınız,gerekli ise medikal yardım alınız. Oda başına sprej miktarı oda taban alanına göre 100ml/m² 'yi aşmamalıdır. Ambalajı sıkıca kapalı tutunuz. Sigara içmeyiniz. Yanma kaynaklarından uzak tutunuz. Çocukların ulaşacağı yerlerden uzak tutunuz. Yutmayınız. Dezenfektanı güvenli kullanınız. Kullanmadan önce daima etiketi ve ürün bilgi kartını okuyunuz. Zehirlenme durumlarında gerektiğinde Ulusal Zehir Merkezinin (UZEM) ücretsiz 114 no'lu telefonunu arayınız.

Ambalaj Şekilleri

Açıklama	Ambalaj
1litre PE püskürtme şişesi	12x1 litre
5 litre PE bidon	3x5 litre
10 litre PE bidon	1x10 litre

Dozajlama Yardımcıları

1 litrelik şişeler için püskürtme başlığı, bidonlar için aktarma musluğu.

Bilirkişi Raporları

Prof.Dr.Schubert, Hijyenist, Frankfurt:
DGHM/VAH rehberine göre yüzey dezenfeksiyonuna ilişkin bilirkişi raporu,27.11.2000.


Prof. Dr. Wille/ Dr.Färber,Hijyenist, Gießen :
-DGHM/VAH rehberine göre yüzey dezenfeksiyonuna ilişkin bilirkişi raporu,16.06.1998.

-Yeni DGHM/VAH rehberi 9/2001'e göre yüzey dezenfeksiyonuna ilişkin ilave bilirkişi raporu,08.12.2003.

O.Univ.-Prof.Dr.Rotter,Dip.Bact.(London),Wien:
DGHM/VAH rehberine göre yüzey dezenfeksiyonuna ilişkin bilirkişi raporu,28.02.2006.

Dr.Steinmann, Virolog, Bremen :

-limon parfümlüsüde mevcut-

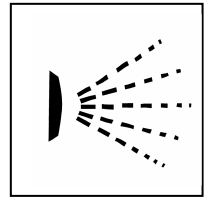

DESCOCEPT AF

Alkol İçerikli Sprey Dezenfektan

Tıbbi Cihaz Kanununa Göre Tıbbi Cihazların ve Biosit Kanununa Göre Yüzeylerin Hızlı Dezenfeksiyonu

Etkinlik raporları: Adeno virüs,03.05.2001;FCV (Noro- /Norwalk-like-Virus),04.04.2005; Vakzina,12.12.2005;BVDV,12.12.2005.

Dr. Werner, Hijyenist, Schwerin:

Tuberkulosidal etkinliğine dair bilirkişi raporu, 12.04.1999

Dermatest, Münster:

Cilt irritasyon özelliklerine ait bilirkişi raporu (epidermal test),26.05.2000.

Konrad Hornschuch,AG

Skai-padding malzemelerin Descosept AF ile dezenfeksiyonu üzerine tavsiyeler,09.08.2005.

**Aldehitsiz
Fenolsüz
DGHM/VAH listesindedir.
ÖGHMP listesindedir.
Dermatolojik olarak test edilmiş.**

CE 0482

Listeleme / Ruhsatlandırma

DGHM/VAH'ın dezenfektan listesine kayıtlı ve ruhsatlıdır. ÖGHMP listesine kayıtlıdır. Biosit kanununa göre Koruyucu ve Mesleki Hekimlik üzerine Alman Enstitüsü'nde (Baua) biosit ürün olarak kaydedilmiştir. Baua kayıt no: N 20338 T.C.Sağlık Bakanlığı ithalat iznine sahiptir.