
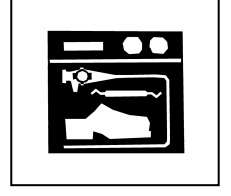


INSTRUMENTEN- MILCH

Fenolsüz

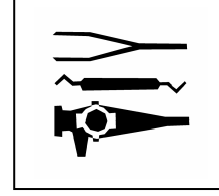

CE

Tıbbi Alet Bakımı

Tıbbi Alet Bakım Yağı

Preparat Tipi

Instrumenten Milch, metalden olan cerrahi tıp aletlerinin ve tıbbi cihazların manuel ve makine ile korunmasını sağlayan **tıbbi alet bakım emülsiyonudur**.

Kullanım Alanları

Instrumenten Milch, tıp ve diş hekimliği alanlarındaki bütün metalden yapılmış aletlerin ve tıbbi aletlerin bakımı için uygundur.

Ürün laboratuvar yıkama otomatları veya daldırma banyolarında uygulanabilir.

Kullanım Şekli

Instrumenten Milch:

- Tıbbi aletlerin yüzeyi üzerinde ince bir film tabakası oluşturarak koruma sağlar.
- Tıbbi beyaz yağların kullanımı sonucu fizyolojik olarak rahatsızlık vermez.
- Kullanımı ekonomiktir.
- Ayrıca tamamlayıcı ek bir bakım gerektirmediğinden dolayı zaman kazandırıcıdır.

Tıbbi aletleri yıkama otomatı veya daldırma banyosundan aldıktan sonra kurumaya bırakın. Aletler gerektiğinde buna ilaveten direkt olarak sterilizasyona alınabilir.

Bileşimi

Tıbbi beyaz yağlar (sıvı parafin)
Su içinde yağ emülgatörleri
Su

Kimyasal ve Fiziksel Verileri

pH (konsantre çözelti) : 5,5 +/-0,5
Yoğunluk : 0,950 +/-0,010

Ambalaj Şekilleri

Açıklama : 5 litre bidon
Ambalaj : 3 x 5 litre

Dozajlama Yardımcıları

Bidon musluğu, bidonlar için dozajlama pompası

Kullanım Konsantrasyonu

Otomatik yıkama makinelerinde kullanımında:
1 litre suya : 0,3 g

Manuel kullanımda (daldırma banyolarında) :
% 3'lük çözelti

*Yıkama otomatı üreticisinin bilgilerine dikkat ediniz

Önemli Uyarılar

Yutmayınız! Deri ve göz ile temasını engelleyiniz. Kullanmadan önce iyice çalkalayınız. Faz ayrışması olabilir, kuvvetli çalkalama ile emülsiyon tekrar oluşur. Bu durum, ürünün kalitesi üzerinde herhangi bir olumsuz etki yapmaz.

Listeleme

Berlin'deki Federal Çevre Dairesine başvurulmuştur.